

EKG Adapterbox

EAB 11



Produkt-Überblick:

Die EAB 11 Adapterbox ist für den schnellen und einfachen Check der Ableitströme bei EKG Saugelektroden Anlagen konzipiert. Der handliche EAB 11 unterliegt keinerlei Wartung oder Kalibrierung und benötigt keine Stromversorgung. Die EKG Saugelektroden werden einfach auf die V2A Platten aufgesetzt und die Patientenleitungen an der oberen Seitenfläche des EAB 11 mit den numerisch codierten Buchsen des Sicherheitstesters verbunden. Die aufgesetzten Saugelektroden können mit dem mitgelieferten Klettbandgitter fixiert werden. Jetzt können die Ableitstrommessungen durchgeführt werden. Weiterhin verfügt der EAB 11 ein angeflanshtes Präzisionsmanometer, mit dem der Unterdruck der Saugelektroden gemessen werden kann.

Produkt-Merkmale:

- Einfachste Handhabung, taschenbuchgroße Adapterbox zum Anschluss von bis zu 10 EKG Saugelektroden
- Numerisch codierte Anschlüsse analog zu den Patientenanschlussbuchsen aller elektrischen Sicherheitstester wie z. B. ESTA und ESA 620 zur Messung von Patientenableitströmen
- Universelle 4 mm-Bananenbuchsen
- Adapterplatten aus V2A Edelstahl, poliert
- Keine Wartung nötig
- Adapter zur Anwendung von Patientensimulatoren bei EKG Saugelektrodenanlagen
- Kunststoffgehäuse (T x B x H = 191 x 135 x 45mm, Gewicht: ca. 250 g)


Weitere Informationen:

METLOG
Deutschland GmbH

Nordring 67, 63843 Niedernberg
Telefon (06028) 999622-0 Fax:999622-11
E-Mail: info@metlog-biomed.eu
Internet: www.metlog-biomed.eu

Anwendungsbeispiele und Möglichkeiten:


Der EAB dargestellt mit den 4 Klettbändern
Zum Fixieren der Saugelektroden und den 10
Patientenleitungen

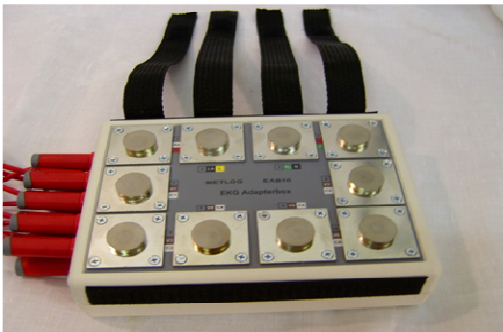

EAB mit 10 aufgelegten Saugelektroden



Fixierung der Elektroden

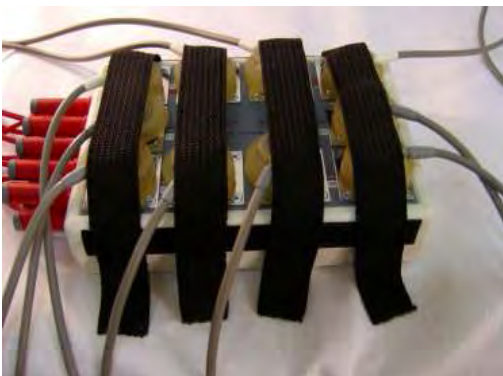

Der EAB zusammen mit dem elektrischen
Sicherheitstester „ger“ zur Messung der
Patientenableitströme



EAB in Anwendung mit einem Patientensimulator
zur Applikation der EKG Signale auf die
Saugelektroden



Bestellinformationen:

Bestellnummer:
EAB 11: 53.151

Optionales Zubehör:

Kabeladapter bestehend aus
10 hochwertigen Laborkabeln :

Bestellnr.: 53.152

Tragetasche:

Bestellnr.: 53.153

Snap-to-banana:

Bestellnr.: 10.001

**Vorfürungen und weitere Informationen direkt beim
Hersteller:**

METLOG
Deutschland GmbH

Nordring 67, 63843 Niedernberg
Telefon (06028) 999622-0 Fax: 999622-11

E-Mail: info@metlog-biomed.eu

Internet: www.metlog-biomed.eu